
### Modalità Avanzata

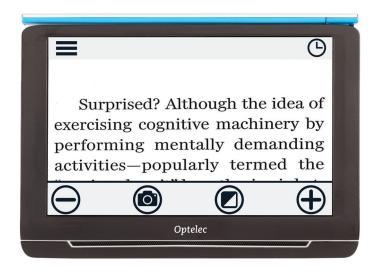

Per passare tra Modalità Semplice e Modalità Avanzata, toccate e tenete premuto il pulsante Modalità e fate la vostra scelta.

In Modalità Avanzata, oltre ai pulsanti in Modalità Semplice sono disponibili i pulsanti seguenti:



Accedi al menu



Ora

#### Compact 10 HD



**Quick Start Guide** 



UDC-02327A Italiano

## Iniziamo




**1. Braccio della telecamera:** Per visualizzare oggetti e fotografie, e per firmare, aprite il braccio della telecamera in modo da avere più spazio.

#### 2. Tasto On / Off:


Breve pressione: Stand by / Riattiva Pressione per 6 secondi: On / Off

- **3. Jack audio:** Usate il jack audio per collegare delle cuffie a Compact 10 HD.
- 4. Connettore USB-C: Ricaricate la batteria di Compact 10 HD con l'alimentatore e il cavo USB-C in dotazione. Caricate completamente la batteria prima di iniziare ad usare il dispositivo per la prima volta.

# Modalità Semplice

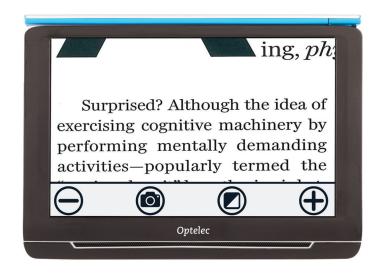

Per passare tra Modalità Semplice e Modalità Avanzata, toccate e tenete premuto il pulsante Modalità e fate la vostra scelta. In Modalità Semplice, sono disponibili i pulsanti seguenti:

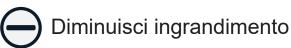



Tocco: Cambia modalità visualizzazione
Tocco prolungato: Modalità Semplice o Avanzata

