


Introduction

Le Compact 6 HD Speech Dock est une station d'accueil portable pour le Compact 6 HD Speech. Vous pouvez facilement prendre une capture d'écran pleine page, et le Compact 6 HD Speech lira le texte.

- | | |
|---|--|
| 1. Plateau inférieure | 5. Connexion USB |
| 2. Support arrière | 6. Haut-parleur |
| 3. Plate-forme d'amarrage | 7. Bouton d'activation / désactivation du haut-parleur |
| 4. Interrupteur pour caméra et lumières | |

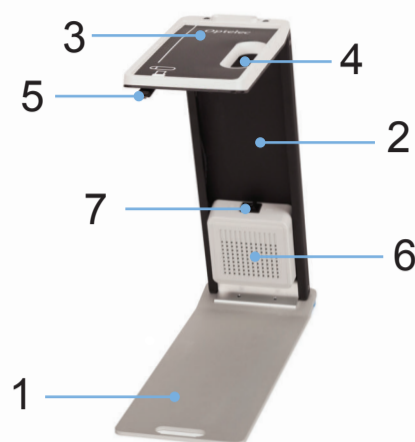

Déplier la station d'accueil vocale



Tenez le socle arrière et la plate-forme d'amarrage avec une main et le plateau inférieure avec votre autre main.



Soulevez et déployez le support arrière jusqu'à ce qu'il vienne en position verticale, puis faites-le glisser vers le bas pour le verrouiller.



Amenez la plate-forme d'accueil vers le haut en position horizontale.



Appuyez doucement sur le support arrière pour le fixer.

Plier le Compact 6 HD Speech Dock



Soulevez doucement la plate-forme d'accueil d'environ 1 cm pour la déverrouiller.



Guidez la plate-forme d'accueil en position verticale.



Tenez la plate-forme d'accueil et le support arrière d'une main et soulevez-les doucement d'environ 1 cm pour les déverrouiller.



Guidez-les vers le bas tout en maintenant la plate-forme d'accueil contre le socle arrière de manière à former un ensemble compact.

Utilisation du Compact 6 HD avec le Speech Dock



Placez la station d'accueil vocale devant vous avec le support arrière tourné vers l'arrière.



Couchez le Compact 6 HD Speech sur le haut avec l'écran orienté vers le haut.



Le Compact 6 HD Speech est placé correctement lorsque la caméra et les lumières sont alignés avec l'interrupteur sur le dessus.



Le bouton blanc de numérisation et le connecteur USB doivent vous faire face.

Positionnement des documents



Pour placer correctement un document, assurez-vous qu'il est en orientation portrait.

Alignez le coin inférieur gauche du document sur le coin inférieur gauche du plateau inférieure.

Le document doit reposer à plat sur le plateau inférieure et ne doit pas être placé sur la partie du plateau inférieure qui est orientée vers le haut.

Lorsqu'il est placé correctement, le Compact 6 HD Speech peut capturer une page entière en orientation portrait.

Raccordement des câbles



Insérez le câble USB de la plate-forme d'accueil dans le port USB du Compact 6 HD Speech pour le charger et connecter le haut-parleur.



Insérez le chargeur Compact 6 HD USB au support arrière dans la connexion de chargement USB.

Chargement et audio

Lorsque le bouton du haut-parleur est activé et que le câble audio est connecté, le son est activé et il provient du haut-parleur.

Lorsque le haut-parleur est désactivé, le Compact 6 HD Speech se charge.

Le Compact 6 HD Speech ne se charge pas lorsque le haut-parleur est activé.

Précautions

Optelec n'est pas responsable de l'utilisation de cet appareil autres que celles décrites dans ce manuel. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

- Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer le Compact 6 HD Speech Dock.
- Évitez les nettoyeurs et les détergents agressifs.
- Ne placez pas le Compact 6 HD Speech Dock sur une surface instable.
- N'utilisez pas et ne rangé pas le Compact 6 HD Speech Dock dans des environnements humides ou chauds.
- N'utilisez pas et ne rangé pas le Compact 6 HD Speech Dock à une température inférieure à 0 ° C ou supérieure à 40 ° C.
- N'exposez pas le Compact 6 HD Speech Dock à une chaleur excessive ou aux rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas le Compact 6 HD Speech Dock dans l'eau.
- Évitez le contact avec les liquides corrosifs.
- Évitez les chocs, ne lancez pas et ne laissez pas tomber le Compact 6 HD Speech Dock.
- Utilisez le chargeur Compact 6 HD uniquement pour alimenter le Compact 6 HD Speech Dock

Risques et effets secondaires: Aucun connu

Caractéristiques

- Conception pliable - pour rangement/transport compact
- Dimensions une fois plié: 375 x 124 x 44 mm / 14.8 x 4.9 x 1.7 pouces
- Dimensions dépliées: 370 x 124 x 365 mm / 14.6 x 4.9 x 14.4 pouces
- Poids: 1.28 kg / 45.2 onces