


Introduzione

Grazie Compact 6 HD Speech Dock sarà possibile acquisire un'intera pagina, e Compact 6 HD Speech leggerà tutto il testo.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Base inferiore | 5. Collegamento USB |
| 2. Braccio posteriore | 6. Altoparlante |
| 3. Piano di supporto | 7. Pulsante On/Off per altoparlante |
| 4. Finestre per telecamera e luci | |

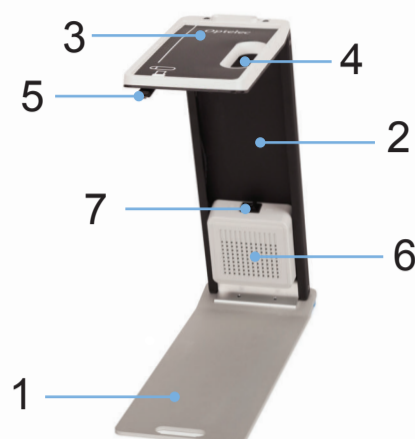

Preparare Speech Dock



Tieni il braccio posteriore e il piano di supporto con una mano e la base inferiore con l'altra.



Solleva ed apri il braccio posteriore fino a quando non è dritto, dopodiché fallo scorrere verso il basso per bloccarlo.



Porta il piano di supporto verso l'alto fino ad arrivare ad una posizione orizzontale.



Spingilo delicatamente in basso verso il braccio posteriore.

Ripiegare Speech Dock



Solleva delicatamente il piano di supporto di circa 1 cm per sbloccare.



Porta il piano di supporto in posizione verticale.



Tieni il piano di supporto e il braccio posteriore con una mano e sollevali delicatamente di circa 1 cm per sbloccare.



Portali verso il basso mentre tieni il piano di supporto contro il braccio posteriore in modo da formare un blocco compatto.

Usare Compact 6 HD Speech Dock



Posiziona il piano davanti a te con il braccio posteriore dietro.



Posiziona Compact 6 HD Speech sulla parte superiore con lo schermo rivolto verso l'alto.



Compact 6 HD Speech è posizionato correttamente quando la telecamera e le luci sono allineate con le finestre sul lato superiore.



Il pulsante di scansione bianco e il connettore USB dovrebbero essere verso di te.

Posizionare i documenti



Per posizionare correttamente un documento, assicurati che sia orientato verticalmente.

Allinea l'angolo in basso a sinistra del documento con l'angolo in basso a sinistra della base inferiore.

Il documento dovrebbe stare fermo sulla base inferiore, e non dovrebbe essere posizionato sulla parte della base con l'angolo rivolto verso l'alto.

Quando è posizionato correttamente, Compact 6 HD Speech può acquisire un'intera pagina con orientamento verticale.

Collegare i cavi



Inserisci il cavo USB del piano di supporto nella porta USB del Compact 6 HD Speech per caricare il dispositivo e collegare l'altoparlante.



Inserisci l'alimentatore USB del Compact 6 HD dal braccio posteriore al collegamento di ricarica USB.

Ricarica ed audio

Quando è acceso il pulsante dell'altoparlante ed è collegato il cavo audio, l'audio viene attivato ed il suono partirà dall'altoparlante.

Quando l'altoparlante è spento, Compact 6 HD Speech sarà in fase di ricarica.

Compact 6 HD Speech non si ricarica quando l'altoparlante è acceso.

Precauzioni

Optelec non si ritiene responsabile nel caso in cui il dispositivo venga usato in maniera diversa da quanto descritto in questo manuale. Conserva il manuale utente per una futura consultazione.

- Usa solo un panno morbido per pulire il supporto.
- Evita detergenti aggressivi.
- Non mettere il supporto su una superficie instabile o comunque non piatta.
- Non usare o non riporre il supporto in ambienti umidi o caldi.
- Non usare o non riporre il supporto in ambienti sotto i 0° o sopra i 40°.
- Non esporre il supporto a fonti di calore eccessive o a contatto diretto con il sole.
- Non usare il supporto in acqua.
- Evita il contatto con liquidi corrosivi.
- Evita urti e colpi al supporto.
- Usa l'alimentatore del Compact 6 HD solo per alimentare il supporto

Rischi ed effetti collaterali: nessuno conosciuto

Specifiche

- Design pieghevole – per maggiore comodità nel trasporto
- Dimensioni quando è ripiegato: 375 x 124 x 44 mm
- Dimensioni quando è aperto: 370 x 124 x 365 mm
- Peso: 1.28 kg