


Introductie

De opvouwbare Wear accessoire verandert de Compact 6 HD elektronische handloop in een handsfree, draagbare oplossing.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Hoofdband voorzijde | 7. Houder |
| 2. Hoofdsteun bovenzijde | 8. Ontkoppel knop |
| 3. Hoofdband achterzijde | 9. Zijkanten |
| 4. Hoofdsteun achterzijde | 10. Gezichtssteun met verzacht oppervlak |
| 5. Hoofdband zijkant | |
| 6. Voorpaneel | |

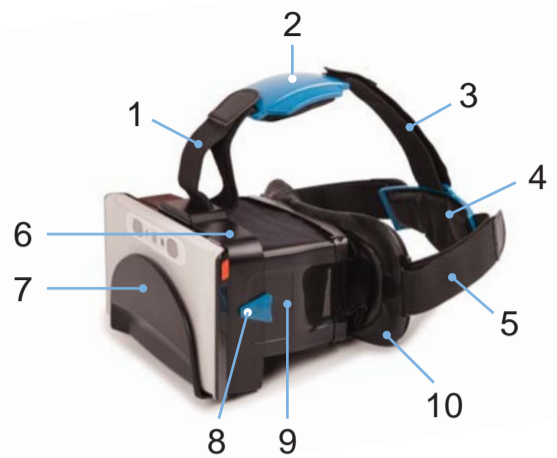

De Wear ontvouwen



Houd de gezichtssteun in de ene hand en het voorpaneel in de andere hand. Ontvouw de Wear zodanig dat de zijkanten parallel zijn.

Breng de achterkant van beide zijkanten in positie door ze naar buiten te drukken tot ze in het slot klikken. De zijkanten staan goed vast wanneer het geheel stevig en stabiel voelt.

De Wear opbouwen



Ontkoppel de beide zijkantsloten door tegelijkertijd de driehoekige knoppen in de richting van de pijl te drukken en duw de beide zijkanten evenwijdig naar binnen.

Schuif de gezichtssteun richting het voor paneel om de Wear in te klappen. Vouw de bovenste hoofdsteun eerst op en daarna de achterste hoofdsteun.

De Compact 6 HD in de Wear plaatsen



Schuif de Compact 6 HD in de houder, zodat het Compact scherm richting het voorpaneel gericht is en de camera naar buiten wijst.

Wanneer de Compact 6 HD symmetrisch in de houder zit en de bovenzijde van de Compact 6 HD evenwijdig loopt met de bovenzijde van het voorpaneel bevindt het zich in de juiste positie.

De onderzijde van de Wear afdekken



Om het licht dat van onder komt te blokkeren kan u de meegeleverde afdekplaatjes gebruiken. Deze afdekplaatjes zijn gemaakt van zelfklevend materiaal dat zich eenvoudig hecht onder de zijkanten.

Draai de Wear op z'n kop en plaats de afdekplaatjes tegen de zijkanten. Controleer of ze de onderkant goed bedekken en goed vast zitten.

Plaatsing op het hoofd



Zorg dat de hoofdbanden voldoende speling hebben voordat ze op het hoofd geplaatst worden.

Pas de hoofdband aan de achterzijde aan zodat deze comfortabel voelt.

Pas de hoofdbanden aan de zijkant aan tot deze comfortabel voelen.

Pas tot slot de hoofdband aan de voorzijde aan tot het geheel stevig, stabiel en gebalanceerd aanvoelt.

De Compact 6 HD Wear gebruiken met een bril

De Compact 6 HD Wear kan in combinatie met een bril gebruikt worden. Als het frame van de bril dun is, kan de Wear gewoon over de bril gedragen worden.

Is het frame van de bril dikker, steek dan de poten van de bril door de bovenste openingen van de gezichtssteun terwijl u de bril op z'n kop vast houdt. Als de poten van de bril volledig door de gaten zijn gestoken draai dan de bril naar de normale draagpositie. Plaats nu de Wear met bril op het hoofd. De poten van de bril steken tijdens het dragen aan de zijkanten uit de Wear en rusten niet zoals gebruikelijk op de oren maar de bril kan zo wel comfortabel gedragen worden.



Perifeer zicht

Met het perifere zicht kan u zien wat er rondom u gebeurt. Om perifeer te kunnen kijken met de Compact 6 HD Wear, opent u beide zijkanten van de gezichtssteun. Zet de zijkanten vast door ze tegen de zelfklevende streep op het masker van de gezichtssteun te vouwen. Nu zijn de zijkanten geopend en kunt u zien wat er rondom u gebeurt terwijl u de Compact 6 HD Wear gebruikt.



Specificaties

- 6X extra vergroting
- Twee prismatische, asferische lenzen
- Gezichtsveld horizontaal 90° en verticaal 55°
- Opvouwbaar ontwerp – voor makkelijk dragen en opbergen
- Toegang tot aanraak scherm om de Compact 6 HD te bedienen
- Afmeting wanneer opgevouwen 200x100x50mm
- Gewicht 230 gram (zonder Compact 6 HD)

Waarschuwingen

Waarschuwingen m.b.t. veiligheid: om letsel of schade te voorkomen, dient u rekening te houden met het volgende voordat u de Wear gebruikt:

- **Voer geen mobiliteitsactiviteiten zoals, lopen, rennen, autorijden etc. uit terwijl u de Compact 6 HD Wear gebruikt!**
- Laat de Wear niet achter in direct zonlicht. De lenzen kunnen brand veroorzaken.
- Kijk niet direct in de zon terwijl u de Compact 6 HD Wear gebruikt.
- Gebruik de Compact 6 HD Wear niet wanneer u visueel ongemak ervaart.
- Gebruik de Compact 6 HD Wear niet als u last hebt van duizeligheid of snel flauw valt.
- Let op dat uw diepte waarneming niet is veranderd na het gebruik van de Compact 6 HD Wear. Als dit wel het geval is, wacht dan totdat uw diepte waarneming weer normaal is voordat u zich bezig houdt met activiteiten die veel van uw visuele bewustzijn vragen (zoals autorijden, machines bedienen, etc.).
- Stel schermhelderheid in om het gebruikscomfort te verhogen.

Belangrijk: Tijdens het kijken naar objecten maakt men normaliter lichte hoofdbewegingen om een volledig beeld te krijgen. Het Compact 6 HD Wear scherm blijft echter statisch en als gevolg daarvan moeten de ogen dus bewegen om het volledig beeld waar te nemen. Deze oogbewegingen maken een grotere uitslag dan normaal bereikt wordt en leiden daarom tot een grotere belasting of **work-out voor de oogspieren**.

Zoals met andere work-outs kan de gebruiker ongemak ervaren, maar dit verdwijnt wanneer de spieren getraind zijn. Houdt er rekening mee dat als u spierpijn in uw ogen ervaart na ongeveer 30 minuten sinds het eerste gebruik, dit vergelijkbaar is met het trainen van andere spieren in uw lijf. Uiteindelijk maakt het de oogspieren fitter en kan het de ogen zelfs ten goede komen!

Lens bescherming & onderhoud

Er zijn lensbeschermers geplaatst op de Wear. Verwijder deze zodra u de Wear gaat gebruiken.



Houd de lenzen schoon en bescherm ze tegen krassen. Worden de lenzen vuil of beslaan ze, verwijder dan eerst voorzichtig alles dat krassen kan veroorzaken en reinig de lenzen met het meegeleverde reinigingsdoekje. Zeep en water kan gebruikt worden maar gebruik **geen** alcohol, aceton of ander chemische middelen!