

Introduction

Le Compact 6 HD Wear est un support frontal pliable qui transforme votre Compact 6 HD en une solution main-libre et portable.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sangle de tête avant | 7. Support |
| 2. Support de tête supérieur | 8. Bouton de déclenchement |
| 3. Sangle de tête arrière | 9. Parois latérale |
| 4. Support de tête arrière | 10. Coussinet doux pour le visage |
| 5. Sangle de tête latérale | |
| 6. Panneau avant | |



Déplier le Wear



Tenez le coussin d'une main et le panneau avant avec l'autre main. Dépliez le Wear pour que les parois latérales soient parallèles.

Poussez l'arrière des deux parois latérales dans leur position en les poussant vers l'extérieur jusqu'à ce que vous les entendiez cliquer derrière le verrou. Les panneaux latéraux sont verrouillés lorsque le Wear ne bouge plus.

Plier le support



Relâchez simultanément le verrou des panneaux latéraux en appuyant sur le bouton triangulaire dans le sens indiqué par la flèche et en poussant symétriquement les panneaux latéraux vers l'intérieur.

Faites glisser le panneau de protection contre le panneau avant pour rétracter le Wear et pliez d'abord le support de tête supérieure, puis le support de tête arrière.

Insérer le Compact 6 HD dans le Wear



Faites glisser le Compact 6 HD dans le support avec l'écran du Compact face au panneau avant et la caméra vers l'extérieur.

L'unité est dans la bonne position lorsqu'elle est placée symétriquement dans le support et le haut du Compact est aligné avec le haut du panneau avant.

Couvrir le bas du Wear



Si vous souhaitez bloquer la lumière provenant du bas, utilisez le couvercle inférieur fourni. Le couvercle inférieure est muni de velcro et il colle au fond des panneaux latéraux.

Retournez l'appareil et placez le couvercle contre les panneaux. Assurez-vous qu'il couvre bien le fond et qu'il demeure en place.

Montage des sangles de tête



Assurez-vous que les sangles sont suffisamment libérés.

Ajustez la sangle arrière pour une position confortable.


Réglez les sangles latérales pour une position confortable.

Réglez la sangle avant pour finaliser le montage et équilibrer le poids.

Le support avec des lunettes

Le Compact 6 HD Wear peut être utilisé avec des lunettes de prescription. Si la monture de vos lunettes est mince, vous pouvez simplement porter le support sur vos lunettes.

Si vos lunettes sont épaisses, passez les branches de vos lunettes à travers les ouvertures supérieures du coussinet doux tout en maintenant les lunettes à l'envers. Lorsque les branches sont complètement ouvertes, tournez vos lunettes à la position où vous les portez. Placez vos lunettes et le Wear sur votre tête. Les branches seront en dehors du Wear et ne reposeront pas sur vos oreilles. Maintenant, vous pouvez porter vos lunettes confortablement.

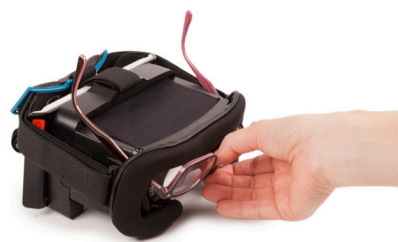

Visualisation périphérique

Le visionnement périphérique vous permet de voir ce qui se passe dans votre environnement lorsque vous portez le Wear. Pour activer la visualisation périphérique, ouvrez les deux côtés du coussinet doux. Pour fixer les côtés, pliez-les contre la bande velcro située sur le masque. Maintenant, les côtés du masque seront ouverts et vous serez en mesure de regarder votre environnement tout en utilisant le Wear.



Specifications

- Grossissement supplémentaire 6x
- Deux lentilles prismatiques asphériques
- Champ de vision horizontalement 90° et verticalement 50°
- Modèle pliable - pour un rangement / transport compact
- Accès à l'écran tactile pour contrôler le Compact 6 HD
- Dimensions lorsqu'il est plié: 200x100x50mm / 7.9 x 3.9 x 2 pouces
- Poids: 230 grammes / 8.11 onces (sans Compact 6 HD)

Précautions

Précautions relatives à la sécurité: Afin d'éviter toute blessure ou dommage avant d'utiliser le Compact 6 HD Wear, veuillez prendre en note les points suivants:

- **Ne marchez pas, ne courez pas, ne conduisez pas et ne faites aucune activité visant à vous déplacer lorsque vous utilisez le Compact 6 HD Wear!**
- Ne pas laisser sous la lumière directe du soleil! Les lentilles pourraient provoquer un incendie.
- Évitez d'utiliser le Compact 6 HD Wear pour regarder directement le soleil!
- N'utilisez pas le Compact 6 HD Wear si vous ressentez une gêne visuelle.
- Non destiné aux personnes ayant des étourdissements et une tendance à s'évanouir.
- Assurez-vous que la perception spatiale n'a pas changé après l'utilisation du Compact 6 HD Wear. Dans le cas contraire, retarder l'activité nécessitant une prise de conscience visuelle (par exemple conduire, faire fonctionner des machines) jusqu'à ce que la perception spatiale revienne à la normale.
- Réglez la luminosité de l'écran pour un bon niveau de confort.

Remarque importante: en regardant les objets dans la vie réelle, nous effectuons de légères rotations de la tête pour regarder les scènes périphériques, l'écran du Compact 6 HD Wear est statique, ce qui fait que les yeux se tournent vers les scènes périphériques. Ces mouvements oculaires ont une plus grande amplitude que d'habitude et cela conduit à un **entraînement pour les muscles oculo-extra-oculaires (EOM)**.

Comme avec n'importe quel autre exercice, l'utilisateur peut éprouver l'inconfort qui disparaît après que les muscles soient entraînés. Gardez à l'esprit si vous ressentez une douleur musculaire oculaire après 30min d'utilisation initiale, s'il vous plaît considérer cela comme l'entraînement des autres muscles du corps! En fin de compte cela rend ces muscles plus forts et cela pourrait bénéficier à vos yeux!

Protection et entretien des lentilles

Les protecteurs de lentilles sont pré-installés sur le Wear. Retirez ces protecteurs de lentilles avant l'utilisation.



Gardez les lentilles propres et protégez-les des rayures. Si les lentilles sont sales ou embuées, commencez par enlever les particules qui peuvent rayer les lentilles et nettoyez-les avec le chiffon de nettoyage de lentille. L'eau savonneuse peut être utilisée pour un meilleur nettoyage, mais ne pas utiliser d'alcool / acétone ou tout autre produit chimique.