


Introduzione

L'accessorio Wear trasforma il videoingranditore Compact 6 HD in una soluzione indossabile.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Banda frontale | 5. Bande laterali |
| 2. Supporto superiore per la testa | 6. Pannello frontale |
| 3. Banda posteriore | 7. Sostegno |
| 4. Supporto posteriore per la testa | 8. Pulsante di rilascio |
| | 9. Prese laterali |
| | 10. Appoggio per il viso |

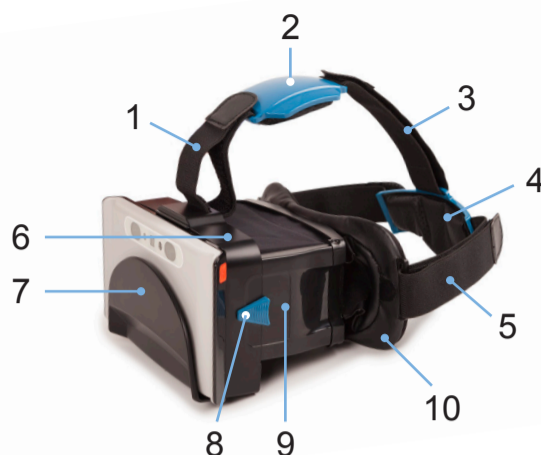

Preparare Wear per l'uso



Tieni l'appoggio per il viso con una mano e il pannello frontale con l'altra. Apri Wear in modo che le prese laterali siano parallele.

Spingi la parte posteriore di tutte e due le prese laterali in posizione premendole verso l'esterno, fino a sentire un click dietro il blocco. Le prese laterali saranno bloccate quando Wear è stabile.

Ripiegare Wear



Rilascia i blocchi delle prese laterali contemporaneamente, spingendo il pulsante triangolare nella direzione indicata dalla freccia e spingi le prese laterali all'interno, simmetricamente.

Fai scorrere l'appoggio per il viso verso il pannello frontale per chiudere Wear e ripiega prima il supporto superiore per la testa e poi quello posteriore.

Inserire Compact 6 HD in Wear



Fai scorrere Compact 6 HD nel sostegno, con lo schermo del Compact verso il pannello frontale e la telecamera verso l'esterno.

L'unità è posizionata correttamente quando è disposta in maniera simmetrica nel sostegno e la parte superiore del Compact è allineata alla parte superiore del pannello frontale.

Coprire la parte inferiore di Wear



Nel caso si voglia bloccare la luce proveniente dal basso, usa la cover in dotazione per la parte inferiore. La cover è di velcro adesivo e si attacca alla parte inferiore delle prese laterali.

Capovolgi l'unità e posiziona la cover contro i bordi. Assicurati che copra la parte inferiore e non si stacchi.

Montaggio supporti per la testa



Assicurati che le bande siano sufficientemente aperte.

Regola la banda posteriore in modo che sia in una posizione comoda.

Regola le bande laterali in modo che siano in una posizione comoda.

Regola la banda frontale per finalizzare il montaggio e bilanciare il peso.

Uso di Wear con gli occhiali

Wear di Compact 6 HD può essere usato insieme agli occhiali. Se la montatura è sottile, puoi indossare Wear sopra gli occhiali.

Se gli occhiali sono spessi, inserisci le astine degli occhiali nelle aperture superiori dell'appoggio per il viso, tenendo gli occhiali capovolti. Ad astine completamente inserite, metti gli occhiali nella posizione corretta, come se dovessi indossarli. Posiziona gli occhiali e Wear sopra la testa. Le astine saranno all'esterno di Wear e non si appoggeranno sulle orecchie. Ora potrai indossare gli occhiali comodamente.



Visualizzazione periferica

La visualizzazione periferica permette di vedere quello che ti circonda mentre usi Wear. Per abilitare la visualizzazione periferica, apri i due lati dell'appoggio per il viso. Per fissare i lati, piegali contro la striscia di velcro posizionata sulla maschera. Adesso i lati della maschera saranno aperti e potrai guardarti intorno mentre usi Wear.



Specifications

- Ingrandimento aggiuntivo 6x
- Due lenti asferiche prismatiche
- Campo visivo: 90° orizzontale e 50° verticale
- Struttura ripiegabile – per un trasporto più facile
- Accesso al touch screen per controllare Compact 6 HD
- Dimensioni (quando ripiegato): 200x100x50 mm
- Peso 230 g (senza Compact 6 HD)

Avvisi

Avvisi relativi alla sicurezza: per evitare infortuni o danni, prima di usare Wear di Compact 6 HD leggi attentamente quanto segue:

- **Non camminare, correre, guidare o fare attività che coinvolgano un movimento mentre usi Wear per Compact 6 HD!**
- Non lasciarlo esposto al sole! Le lenti potrebbero causare un incendio.
- Evita di usare Wear per guardare direttamente il sole!
- Non usare Wear se provi una sensazione di disagio.
- Wear non è raccomandato per persone che hanno tendenze a capogiri o svenimenti.
- Assicurati che la percezione spaziale non sia mutata dopo aver usato Wear. In caso contrario, aspetta a svolgere attività che richiedano una certa concentrazione visiva (guida, uso di macchinari) fino a ritornare alla normalità.
- Regola la luminosità dello schermo per raggiungere un buon livello di confort.

Notizia importante: quando guardiamo gli oggetti, facciamo delle piccole rotazioni della testa per cogliere anche le zone periferiche; lo schermo di Wear è statico, portando a muovere gli occhi per vedere le zone periferiche. Questi spostamenti degli occhi hanno un'estensione maggiore del solito e portano ad un ulteriore **esercizio** per i **muscoli extra oculari (EOM)**.

Come per qualsiasi altro esercizio, l'utente può riscontrare disagio, che scompare una volta che i muscoli tornano allenati. Tienilo presente se senti dolore dopo 30 minuti circa di uso iniziale; alla fine, questo allenamento renderà i muscoli extra oculari più forti e porterà beneficio agli occhi!

Protezione e manutenzione delle lenti

Le protezioni di fabbrica per le lenti sono pre-installate su Wear. Rimuovile prima dell'uso.



Tieni le lenti pulite e proteggile dai graffi. Se le lenti si sporcano, innanzitutto rimuovi la polvere che può graffiare le lenti e puliscile con un panno per lenti. Puoi usare un po' di acqua e sapone per una migliore pulizia, ma **non** usare alcool/acetone o altri prodotti chimici.